

EXAMEN DE ALCOHOL EN ALIENTO

El examen de Alcohol en el Aliento es un método simple y conveniente para detectar el uso de alcohol y para calcular los niveles de intoxicación alcohólica en concentraciones de 0.02% o mayor (nivel BRAC).

◆ Sencillo de Utilizar

El examen de alcohol en aliento (soplo), usa una reacción química que produce un cambio de color para indicar la presencia del alcohol. Cambiando los cristales de color, de amarillo a verde/azul.

◆ Altamente Recomendable

Es ideal para utilizarlo en controles médicos, en programas terapéuticos. En empresas para control de personal (transportistas, seguridad, departamentos de RRHH, etc).

◆ Desechable


Es un aparato desechable de 1 solo uso, rápido y sencillo.

◆ Rápido

Resultados evidenciales en 2 minutos.

NOTA: Los cristales amarillos pierden su color o cambian a un color azul o verde con la presencia del alcohol. Cuando se expone al aliento que no tiene alcohol, el color amarillo no cambia.

MODO DE USO:

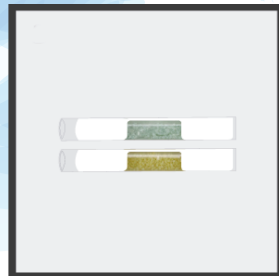

1. Para hacer el examen, el examinador aprieta el tubo una vez para romper la ampolla en el tubo, y luego solicita al sujeto que sopla desde un extremo del tubo por 12 segundos.

2. Cualquier cantidad de alcohol mayor a 0.02% en el aliento hace que los cristales amarillos se conviertan en un color verde o azul dentro de 2 minutos.

Amarillo	Verde	Azul
No hay presencia	Presencia de 0.02%	