




Los paneles Protgt son pruebas rápidas para la detección de drogas en muestra de orina, en combinaciones de 3 a 6 parámetros.

PROCEDIMIENTO

1. El producto debe ser abierto hasta el momento que vaya a ser usado. Permaneciendo a una temperatura ambiente (15 – 30 C).
2. Saque el dispositivo de la bolsa sellada.
3. Quite la tapa del dispositivo y ponga en este la muestra de orina por método de inmersión por un tiempo de 10 segundos aproximadamente.
4. Retire el dispositivo de la muestra y vuelva a colocar la tapa.
5. Lea el resultado a los 4 – 7 minutos.

IMPORTANTE: No interprete los resultados después de los 7 minutos.

Negativo (-)

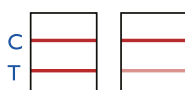

Positivo (+)



Inválido



Detecta las siguientes drogas simultáneamente.

- ▶ Anfetaminas
- ▶ Metanfetaminas
- ▶ Cocaína
- ▶ Marihuana
- ▶ Opiáceo
- ▶ Benzodiacepina




CADENA DE CUSTODIA

Pregunte por nuestra asesoría para la Cadena de Custodia.


- ▶ 99.9% de efectividad
- ▶ BPM
- ▶ FDA
- ▶ ISO
- ▶ Confiable, estable y precisa

INSTRUCCIONES

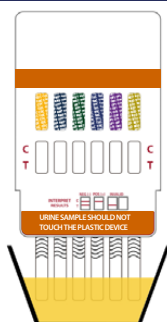


1. Recolección

Recoja la orina en un vaso para muestras e inmersa las tiras del panel en la orina.

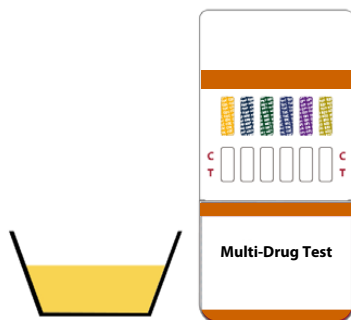

2. Proteja su muestra

Coloque la tapa protectora sobre las tiras y coloque el dispositivo en una superficie plana y limpia.

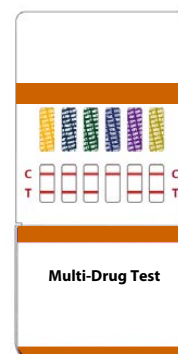

3. Interpretación de resultados

Si aparece la línea C y no hay línea T, el resultado preliminar es positivo para esa droga. Si tanto la línea C como la línea T aparecen en la prueba, el resultado es negativo para esa droga.